

## INSTRUCCIONES DE USO COMP METAL CONNECTOR

### » **COMP METAL CONNECTOR**

Comp Metal Connector: código 1912021  
Contenido: jeringa de 3 gr

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Comp Metal Connector es un opacificador de imprimación universal que se endurece bajo exposición luminosa y se aplica entre Comp Metal Primer y opacificadores de polvo o pasta de uso comercial que también se endurecen cuando se exponen a la luz.

Comp Metal Connector mejora la composición química entre el imprimador y el opacificador, y contribuye a una unión adherente simple y segura.

#### **UNIÓN ADHERENTE:**

La estructura se elabora de forma habitual tras la fundición.

La superficie se chorrea con arena y se sopla con aire comprimido sin aceite. Comp Metal Primer se aplica como componente adherente (imprimador) según el manual de instrucciones. Para lograr un vendaje adherente óptimo se aplica Comp Metal Connector de forma saturada con un pincel fino y corto (¡no efectúe lavado!). La fluidez puede optimizarse removiendo en un bloque mezclador.

En la área de retenciones ha de procurarse efectuar una aplicación especialmente fina.

El material posee excelentes propiedades de endurecimiento por exposición a la luz, lo cual garantiza un fraguado óptimo.

#### **APLICACIÓN DEL OPACIFICADOR:**

A continuación, aplique y polimerice directamente el opacificador (polvo / líquido o pasta) según las especificaciones del correspondiente fabricante.

#### **FUENTES / PREVENCIÓN DE ERRORES:**

Las superficies de la estructura han de estar exentas de grasa y sin restos de pulido. Comp Metal Connector sólo debe aplicarse en finas capas. No utilice aparatos de polimerización intermedia con objeto de polimerizar.

#### **TIEMPO DE TRABAJO DE LAS PASTAS:**

1- 3 min. en función de las condiciones de luz.

#### **CONSERVACIÓN:**

El material debe conservarse a 5 - 25° C. Cierre bien la jeringa inmediatamente después del uso y evite su exposición directa a la luz.

#### **CADUCIDAD:**

La fecha de caducidad figura en la etiqueta de la correspondiente jeringa. No debe utilizarse el material después de esa fecha. Contenido de una jeringa: 3 g

#### **GARANTÍA:**

Nuestras indicaciones de aplicación, tanto las comunicadas verbalmente, por escrito o mediante explicaciones prácticas, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que sólo pueden considerarse como orientativas. Nuestros productos están sometidos a un desarrollo constante, por lo que nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en los mismos.

**EFFETTI SECONDARI:**

Si se manipula y utiliza este producto sanitario de forma correcta, es muy poco probable que se produzcan efectos secundarios adversos. Sin embargo, no cabe descartar por completo la posibilidad de reacciones inmunitarias (p. ej. alergias) o molestias locales. En caso de que observe algún efecto secundario adverso, incluso si es dudoso, rogamos nos lo comuniquen.

**CONTRAINDICACIONES / INTERACCIONES:**

Si el paciente presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes, este producto no debe utilizarse, o sólo bajo un control estricto del médico u odontólogo responsable del tratamiento. En esos casos, puede consultar la composición de este producto sanitario. El odontólogo debe tener en cuenta al utilizarlo las reacciones cruzadas o interacciones conocidas de este producto sanitario con otros materiales presentes en la boca del paciente.

**NOTA:**

Transmita todas las informaciones anteriores al odontólogo responsable del tratamiento en caso de que emplee este material para un producto sanitario a medida. Observe las correspondientes fichas de seguridad para el procesado del material.