



GI-MASK[®] AUTOMIX
New Formula

Step by Step

 **COLTENE**

Indirekte Technik für Kronen- und Brückenrestaurationen

Indirect technique for crown and bridge work



Arbeitsmodell mit Lab-Putty Schlüssel.

Unsectioned model with Lab-Putty impression.



Silikonschlüssel mit GI-MASK Universal Separator isolieren.

Isolation of the silicone matrix key using GI-MASK Universal Separator.



GI-MASK Automix New Formula injizieren.

Injection of GI-MASK Automix New Formula.



Fertiges Modell mit GI-MASK Automix New Formula.

Model with GI-MASK Automix New Formula.



Restauration auf dem Modell.

Restoration on the model.



Fertiggestellte Restauration.

Finished restoration.

Direkte Technik für die implantatgetragene Supra-Konstruktion

Direct technique for implant supra-structures




Abformung mit GI-MASK Universal Separator isolieren.

Isolation of the impression using GI-MASK Universal Separator.



Direkte Applikation von GI-MASK Automix New Formula in die Abformung.

Direct application of GI-MASK Automix New Formula into the impression.

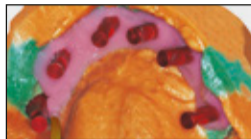

Optimale thixotrope Konsistenz.

Optimal thixotropic consistency.



Ausgießen der Abformung mit Superhartgips.

Fabrication of the stone model.



Fertiges Modell mit GI-MASK Automix New Formula.

Model with GI-MASK Automix New Formula.

Zeiten für die direkte und indirekte Technik
Times for the direct and indirect technique

≥ 9:00 min (23 °C / 73 °F)

Verarbeitungszeit /
working time:
≤ 2 min

Verweildauer /
setting time:
≥ 7 min



Bestellinformationen / Order Information



- 8060 GI-MASK Automix New Formula Starter Kit**
GI-MASK Automix New Formula Kartusche/*cartridge*
GI-MASK Universal Separator
Mixing Tips, yellow/small
Oral Tips, yellow
Fräser für Silikone/*Trimmer for silicones*
- 8065 GI-MASK Automix New Formula Refill Kit**
GI-MASK Automix New Formula Kartusche/*cartridge*
Mixing Tips, yellow/small
Oral Tips, yellow
- 8000 GI-MASK Universal Separator**
- 6550 Mixing Tips, yellow/small**
- 6555 Oral Tips, yellow**
- 6900 Dispenser 50/75**
- 8075 Fräser für Silikone/*Trimmer for silicones***

2 x 50 ml
1 x 50 ml
12 Stk./pcs.
12 Stk./pcs.
1 Stk./pcs.

2 x 50 ml
12 Stk./pcs.
12 Stk./pcs.
1 x 50 ml
40 Stk./pcs.
100 Stk./pcs.
1 Stk./pcs.
1 Stk./pcs.

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA

www.coltene.com
© 2015 Coltène/Whaledent

 **COLTENE**