

Istruzioni d'uso

Multisil-Primer

Leggere attentamente le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni, dovuti all'inosservanza delle presenti istruzioni d'uso.

1. Campo d'utilizzo

Il Multisil-Primer crea un'adesione ottimale tra le resine acriliche ed i siliconi A.

2. Indicazioni

Per realizzare l'adesione tra le resine acriliche ed i siliconi A.


3. Controindicazioni

In base allo stato attuale delle nostre conoscenze non sono note controindicazioni. In caso di sospetto di intolleranza a questo prodotto, deve essere utilizzato solo previo controllo allergologico e certificazione dell'inesistenza di eventuali allergie.

4. Avvertenze sui pericoli e per la sicurezza

In caso di contatto con la cute lavare con abbondante acqua e sapone. Nuoce alla salute, sono possibili danni irreversibili. Non inalare i vapori, aerare l'ambiente. A seguito dell'inalazione di vapori portare il soggetto all'aria aperta. Dopo il contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua. Leggermente infiammabile: tenere lontano da fonti di calore, non fumare. Richiedere separatamente la scheda tecnica di sicurezza del prodotto.

4.1 Frasi R e frasi S

 Xn, nocivo

Frasi R

R 40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
R 48/20 Nocivo alla salute: Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R 65 Nocivo alla salute: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

Frasi S

S 3 Conservare in un luogo fresco.
S 23 Non respirare i vapori
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

5. Avvertenze per la conservazione e la durata

5.1 Avvertenze per la conservazione

Conservare il Multisil-Primer in luogo fresco e asciutto (non superiore a 28°C). Sigillare il recipiente dopo l'uso, proteggere dai raggi solari.

5.2 Avvertenze per la durata



Non utilizzare più il prodotto dopo la data di scadenza (vedi etichetta).

6. Lavorazione

Fresare la resina PMMA con un'apposita fresa. Applicare uno strato sottile di Multisil-Primer, lasciare asciugare 3 minuti, poi applicare il silicone.

Evitare la contaminazione del Multisil-Primer dopo l'applicazione (per esempio dovuta all'umidità, grasso, ecc.), per non compromettere l'adesione del silicone A alla resina PMMA.

7. Simboli utilizzati

 Da utilizzare fino a AAAA-MM-GG  Numero di lotto

 Proteggere dai raggi solari  28° C temperatura massima

8. Ulteriori avvertenze

Questi istruzioni d'uso si basano sullo stato attuale della tecnica e su nostre esperienze. Il prodotto deve essere utilizzato solo in base alle indicazioni descritte al punto 2. L'utente è personalmente responsabile dell'utilizzo del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per risultati non conformi, poiché non ha alcuna influenza sulle lavorazioni successive. Nel caso in cui, tuttavia, fosse richiesto un risarcimento dei danni, questo sarà commisurato esclusivamente al valore commerciale dei nostri prodotti.

Hoja de instrucción

Multisil-Primer

Rogamos lean antes de usar el producto la información sobre este.

Por posible daño, que se haya podido producir por no haber leído la hoja de instrucciones, desestimado por parte del fabricante de cualquier posible culpabilidad.

1. Campo de utilización

Con Multisil-Primer se consigue una unión de pegado perfecta entre plásticos de acrilato y Siliconas A.

2. Indicación

Crear una unión entre materiales acrílicos y siliconas A.


3. Contraindicación

No se conoce ninguna contraindicación actual. Si hubiese alguna sospecha de incompatibilidad solo se podrá utilizar siempre y cuando se haya realizado una aclaración por parte del alergólogo y no se haya demostrado ninguna alergia.

4. Consejos de peligrosidad y seguridad

Si hay contacto con la piel lavar bien con agua y jabón. Puede perjudicar la salud. Posibles perjuicios irreversibles. No inhalar vapores, procurar aire fresco. Llevar al aire libre a la persona que haya respirado vapores. Si se produce contacto con los ojos, lavarlos con mucha agua. Se inflama fácilmente: alejarlo de los focos de inflamación, no fumar. Pedir por separado la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

4.1 Normas R y S

 Xn, perjudicial para la salud



0483

Normas R

R 40 Sospecha a reacciones cancerigenas
R 48/20 perjudicial para la salud: durante larga exposición al respirar graves consecuencias de salud puede perjudicar al feto en el cuerpo de la madre
R 63 puede perjudicar al feto en el cuerpo de la madre
R 65 perjudicial para la salud: puede producir al tragar daños en el pulmón

Normas S

S 3 almacenar en lugar fresco
S 23 no respirar los vapores
S 36/37 llevar durante su manipulación guantes y ropa de protección adecuadas
S 60 este producto y su recipiente se consideran basura peligrosa

5. Consejo de almacenamiento y caducidad

5.1 Almacenamiento

Almacenar Multisil-Primer en lugar seco y fresco (no por encima de los 28° C), cerrar bien el envase, proteger de los rayos de la luz.

5.2 Consejo de caducidad

No se deberá utilizar después de haber caducado (ver etiqueta).

6. Modo de empleo

La resina PMMA se debe lijar con una fresa para plásticos.

Poner una capa fina de Multisil-Primer, airear durante 3 minutos, poner la silicona.

Evitar la contaminación del Multisil-Primer (por ejemplo por humedad, grasa, etc.), ya que puede impedir el pegado perfecto de la Silicona A y de la resina PMMA.

7. Símbolos utilizados



Utilizable hasta AAAA-MM-DD



Descripción de lote



Proteger de los rayos del sol



limite superior de temperatura 28° C

8. Consejos adicionales

La información sobre el producto se acoge a los últimos resultados y experiencias sobre el mismo. Por ello aconsejamos antes de su uso leer de nuevo la información sobre el producto. El producto solo podrá ser utilizado como está indicado en el Punto 2.

El usuario es responsable del uso del producto. Para los resultados incorrectos no hay responsabilidad por parte de bredent medical y ninguna influencia directa en el uso. Los requisitos para la remuneración que se presenta posiblemente sin embargo refieren exclusivamente al valor de la materia de nuestros productos.

bredent

GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-22 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-24
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com